



Tipps zur Pflege

Reinigen Sie ihre Organical®Aligner Schienen jeweils morgens und abends sowie nach den Mahlzeiten mit etwas Zahnpasta und kaltem Wasser.



Kaffee, Tee, Rotwein und Zigaretten können die Organical®Aligner Schienen verfärben. Die Funktion bleibt aber trotzdem erhalten.



Bitte die Organical®Aligner Schienen **NIE** unter heißem Wasser abspülen!



Lebenslang schöne Zähne

Um das Endergebnis zu halten, ist eine Retainerschiene unbedingt nötig. Die letzte Organical®Aligner Schiene ist hierfür **NICHT** geeignet. **Bitte sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt.**



Hergestellt in Berlin von



Organical® Aligner „FS“-Zweischienenkonzept

Anwendung und Pflege Ihrer Organical® Aligner Schienen



Rübeling+Klar Dental Labor GmbH

Ruwersteig 43 · 12681 Berlin
www.ruebeling-klar.de

Folgen Sie uns auch auf



Rev. 3 – 05/2025



Produkt: Organical® Aligner
Schienen zur Korrektur von
leichten Zahnfehlstellungen
Sonderanfertigung

Anleitung für
Patient*innen

Wichtige Informationen zur Anwendung und Pflege Ihrer Organical® Aligner Schienen




Tragezeit

Bitte tragen Sie die Organical® Aligner Schienen rund um die Uhr. Die Organical® Aligner Schienen werden nur zum Essen und zur Zahnpflege herausgenommen (andernfalls kann sich die Behandlung verlängern).



Aufbewahrung

Während Sie essen, bewahren Sie bitte die Organical® Aligner Schienen in Ihrer Schienendose auf.

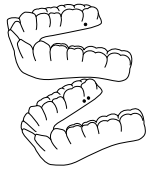

Tragefolge

Sie bekommen pro Step ein Set mit zwei Organical® Aligner Schienen. Tragen Sie diese in der Reihenfolge: Flexibilisierungsschiene (F-Schiene) in der ersten und zweiten Woche und die Stabilisierungsschiene (S-Schiene) in der dritten und vierten Woche. Die Schienen sind durch einen bzw. zwei Punkte im hinteren Bereich gekennzeichnet.

Bei einer Unterbrechung der Aligner Behandlung, fehlender oder unzureichender Compliance des Patienten kann es im Einzelfall zu einer kostenpflichtigen Wiederholung der Steps kommen.






Zeitplan

Bitte folgen Sie Ihrem individuellen Therapiekalender, in den Sie die festgelegten Tragezeiten für die unterschiedlichen Organical® Aligner Schienen sowie den Kontrollbesuchen bei Ihrem Zahnarzt eintragen.

Vergessen Sie nicht ihre Zahnpflege

- Putzen Sie Ihre Zähne gründlich nach jeder Mahlzeit.
- Säubern Sie unterstützend mit Zahnseide oder Interdentalbürsten die Zahnzwischenräume.
- Verwenden Sie Mundspüllösung (geeignet für unterwegs).

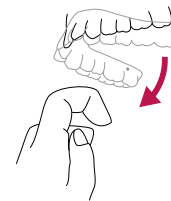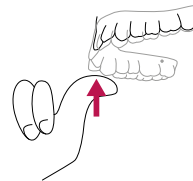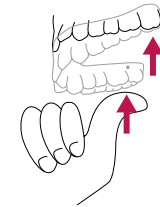

Einsetzen der Organical® Aligner Schiene


1. Setzen Sie zuerst den hinteren Teil der Organical® Aligner Schiene ein.
2. Anschließend drücken Sie den vorderen Teil der Organical® Aligner Schiene auf die Zähne.

Herausnehmen der Organical® Aligner Schiene

Beim Herausnehmen der Organical® Aligner Schiene gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor und lösen sie zuerst an den hinteren Zähnen.

Tipps und Tricks

Nach der Eingliederung kann es passieren, dass Sie ein Spannungsgefühl auf den Zähnen haben. Gewöhnlich lässt dieses bereits nach kurzer Zeit nach.

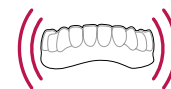

In manchen Fällen ist es möglich, dass Sie in den ersten Tagen das Gefühl haben, im Frontbereich sei die Organical® Aligner Schiene noch nicht in der Endposition, wobei sie im Seitenzahnbereich akkurat sitzt. Dieser Effekt ist gewollt für bestimmte Bewegungen der Zähne. Nach ein paar Tagen setzt sich die Organical® Aligner Schiene.

